


Conversor Pro

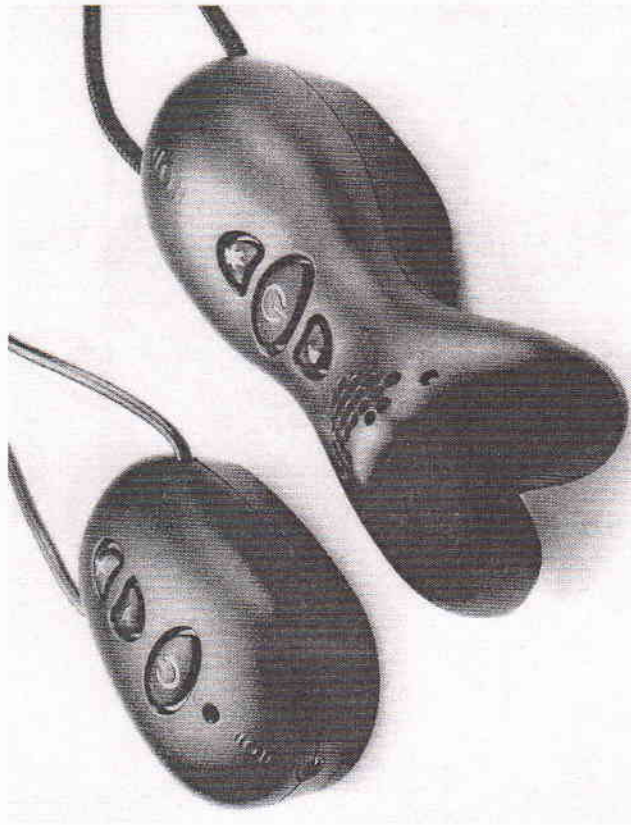

Руководство пользователя

Made in the UK for Conversor Limited
info@conversorproducts.com
www.conversorproducts.com

Гарантия производителя

Производитель, Conversor Limited, предоставляет ограниченную гарантию в 2 года. Гарантия вступает в силу с даты приобретения оборудования. На батареи, микрофон, ремень на запястье, шейную петлю-приемник, распространяется гарантия в 1 год

Что входит в гарантию?

Любой электронный компонент, который, из-за изготовления, производства, или дефекта конструкции, не работает при нормальном использовании в течение срока действия гарантии, будет заменен или отремонтирован без дополнительной оплаты. Транспортные расходы оплачиваются заказчиком. Если установлено, что ремонт не возможен, вся установка может быть заменена эквивалентной единицей по взаимному согласию дилера и клиента.

На что не распространяется данная гарантия?

Эта двухлетняя ограниченная гарантия не применяется на:

- Неисправности, в результате злоупотребления, отсутствия ухода или несчастного случая.
- Периферийные аксессуары, которые описаны в рекламный буклет - гарантия 90 дней с момента покупки.
- Батареи, микрофон, ремень на запястье, и шейная петля для приемника - гарантия распространяется на один год.
- Косвенные убытки и ущерб в результате задержки или потери устройства.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства или любого из его продуктов в любое время без каких-либо обязательств вносить какие-либо изменения, в ранее проданные изделия.


Если ваша система требует обслуживания в соответствии с условиями настоящей гарантии, тщательно упакуйте всю продукцию для предотвращения повреждения при перевозке и верните ее по месту приобретения. Составьте подробное описание проблемы, ваше полное имя, фамилия, и адрес доставки, и номер телефона. Указанная выше гарантия не затрагивает никаких юридических прав, которые вы используете в соответствии с применимым национальным законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров.

Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение Conversor Pro, универсальное вспомогательное устройство, которое увеличивает четкость звука в различных повседневных ситуациях.

Conversor Pro включает в себя следующее:

- Микрофон/передатчик
- Подвесной приемник
- Блок питания
- ТВ и аудио кабели, шнур на шею и чехол для переноски

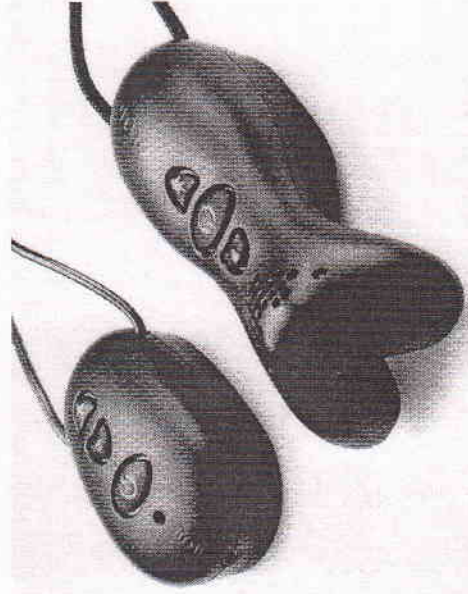


Кулон приемник,
(‘приемник’)

Микрофон/передатчик
(‘микрофон’)

Используя вместе с наушниками или вашими слуховыми аппаратами*, Conversor Pro позволит значительно улучшить вашу способность слышать, выберет и нацелит на конкретный звук. Вы просто направьте микрофон в сторону, или место близкое к тому звуку, который вы хотели бы услышать. Для того, чтобы Conversor Pro работал с Вашим слуховым аппаратом, он должен иметь T или telecoil программы.

РАЗГОВОР ОДИН НА ОДИН:

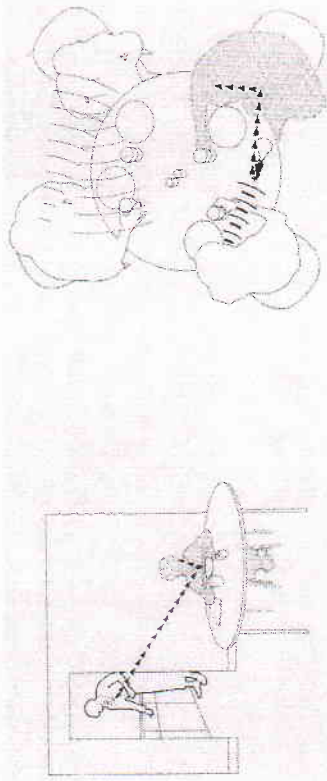

Удаленный разговор
из другой комнаты

или с одним собеседником в группе

Дома, большинство пар не находятся все свое время вместе в одной комнате. Если Ваш спутник будет носить передатчик на шейном шнуре, нося свой приемник, вы будете слышать другого человека, с ясностью и сможете общаться на комфортных уровнях, несмотря на то, что находитесь в разных комнатах.


Настройка Conversor Pro впервые

1. Наушники или слуховой аппарат

Conversor Pro может использоваться с наушниками. Если вы носите слуховой аппарат включите режим telesoï или T-программы. (см. руководство пользователя вашего слухового аппарата или обратитесь к аудиологу)

2. Установка микрофона

1. Для переключения между режимом **увеличения и всенаправленным режимом** нажмите кнопку: ▼ . Зеленый цвет указывает на включение режим увеличения.
2. Для переключения микрофона **ВКЛ/ВЫКЛ**, нажмите центральную кнопку в течение двух секунд. Зеленый цвет указывает на включение микрофона, красный цвет индикатора указывает на низкий уровень заряда аккумулятора.
3. Для выбора режима **повышения**, нажмите эту кнопку: ✳ . Зеленый цвет – включено

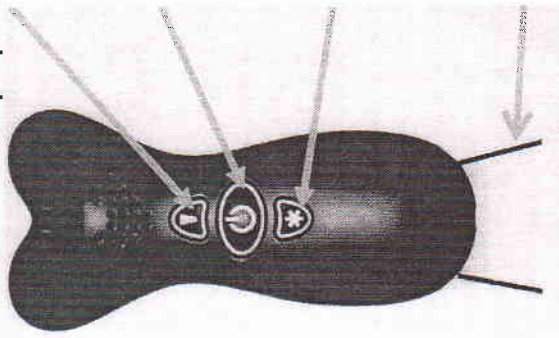


4. Браслет является также радиоантенной - не повредите его!

3. Кнопки увеличения и повышения

Выберите кнопку увеличения для направленного режима. Кнопка загорится зеленым светом. Этот параметр идеально подходит для разговора один на один, и разговоров, когда вы находитесь в группе, слушая учителя. Всенаправленный режим используется для семьи или группы в ситуациях, когда вы хотите услышать все звуки вокруг вас.

Выберите кнопку повышения, загорится зеленый индикатор для дополнительного усиления, когда динамик или источник звука улавливается слишком тихо.



УДАЛЕННОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ

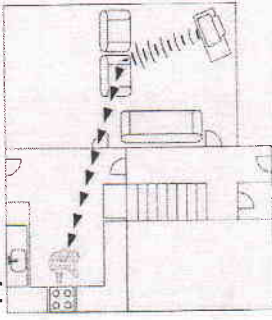

Прослушивая телевизор в другой комнате

Поместите микрофон рядом с телевизором и перемещайтесь из комнаты в комнату, ваш приемник будет улавливать звук четко, от телевизора до 50 метров, даже если вы находитесь в другой комнате.

НА ЛЕКЦИИ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

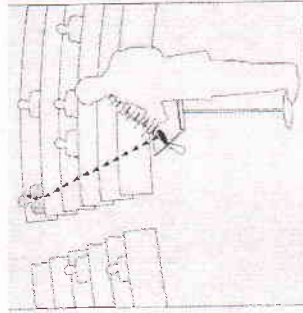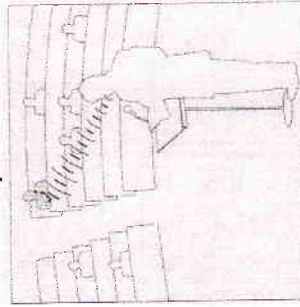

держат в руках, размещен рядом или носит оратор

Conversor Pro был разработан, чтобы дать вам возможность слушать ораторов явно издалека. Есть два способа этого достичь:

(1) Держать микрофон в руке и направить его на источник звука до 15 метров. В большой тихой комнате, выберите режим увеличения в сочетании с форсированным режимом, чтобы сосредоточиться на удаленном ораторе.

(2) Или, установите микрофон на трибуне, или попросите оратора, чтобы он носил его на шейном шнуре, который входит в комплект поставки. Микрофон передаст слова до 50 метров с повышенной ясностью звучания на ваш слуховой аппарат.

Как только микрофон включен индикатор на приёмнике будет светиться зеленым цветом.

Когда свет становится красным, это свидетельствует о том, что заряд батареи составляет 25% от оставшегося или примерно осталось 2,5 часа заряда.

6. Настройка громкости

Приемник автоматически сохраняет последний уровень громкости, выбранного перед тем, как аппарат был выключен. Этот уровень остается неизменным, пока Вы не выберете новый уровень громкости. Каждому уровню соответствует звуковой сигнал, при нажатии кнопки управления громкостью. Когда верхний предел громкости будет достигнут, последует более высокий " сигнал " .

7. Использование наушников или гарнитур

Подключите наушники или гарнитуру в гнездо. Чем более качественные наушники или гарнитуру вы используете, тем лучше качество звучания вы услышите через ваш Conversor Pro.


8. С помощью слухового аппарата(ов)

(а) Установка и настройка слуховых аппаратов

Переключите ваш слуховой аппарат, чтобы установить режим telesoii или 'T' программы, но не регулируйте его громкость. С передатчиком на всенаправленном режиме выберите звук, который вы хотите прослушать.

Conversor Pro в повседневном использовании:

В МАШИНЕ:

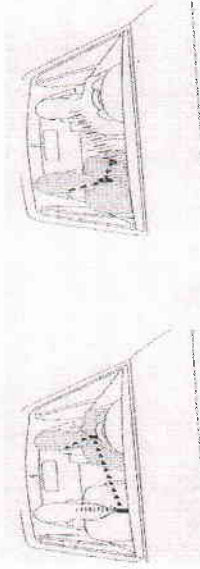


В качестве водителя

или


В качестве пассажира

Внутри движущегося автомобиля может быть шумная среда, создающая проблемы прослушивания для людей в слуховых аппаратах. Являйтесь ли вы водителем или пассажиром, Conversor Pro позволяет вам слушать спутника при движении.

НА СЕМЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ, ОБЕДЕ, УЖИНЕ ИЛИ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ:

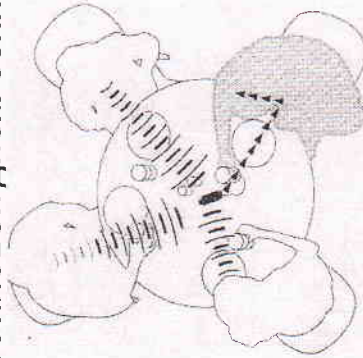

Групповое прослушивание/
дискуссия

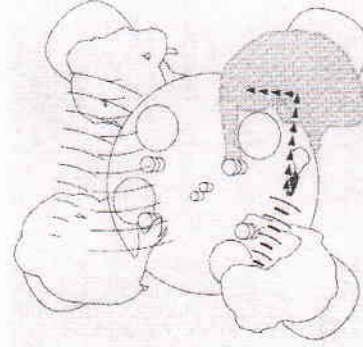

Разговор один на один

Для разговора один-на-один, установите микрофон в режиме увеличения и поставьте на стол между вами и тем человеком с которым вы хотите общаться. Или примите участие в групповых дискуссиях, выберите всенаправленный режим в микрофоне, и установите в середину стола.

1. Подключение к телевизору со SCART адаптер (Европа)

SCART-разъем является мульти-контактным разъемом на задней панели многих телевизоров, спутниковых и кабельных приставок и DVD-плееров. Подключите ТВ-кабель SCART-адаптер и подключите разъем к микрофону. Разъем SCART адаптер в телевизоре или другом устройстве. Подключение через SCART адаптер позволяет так же и другим слушать устройства.

2. Подключение к телевизору через TV-кабель только (USA/ROW)

Если ваше устройство не имеет разъем SCART на задней панели, она, скорее всего, рhono или разъемы RCA. Эти небольшие, круглые кольца с красным или белым пластиковым вкладышем, они могут быть расположены на передней или задней панели устройства (см. раздел "устройство, руководство пользователя). Как с SCART адаптер, соединение не прервется, динамики будут работать и позволяют другим слушать одновременно. Вы можете подключить микрофон, используя TV-кабель, который входит в комплект поставки.

3. Телевизор, радио, компьютер и другие устройства связи

Большинство современных ТВ, радио, PC, iPod и других аудио-устройств имеют гнезда для подключения наушников. Вставьте в телевизор кабель для наушников или аудиоустройство.

Инструкция по уходу

- Converso Pro откалиброван для оптимального использования.
- Не храните Converso Pro при экстремальных температурах. Это может сократить срок службы батареи, и повлиять на использование. Высокая температура может также снизить производительность.
- Не бросайте.
- Держать оба устройства подальше от влаги и высокой влажности - они не являются водонепроницаемыми.
- Избегайте контакта с водой или другими жидкостями, которые могут привести к повреждению внутренних электронных компонентов.
- Старайтесь избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Осторожно храните, приемник-шейную петлю, сильно не наматывайте на устройство. Он содержит провод, который может быть поврежден.
- Не пытайтесь вскрывать корпус микрофона или приемника (кроме батарейного отсека для замены батареи). Они не содержат деталей, обслуживаемых пользователем. Неавторизованное обслуживание устройства приводит к прекращению действия гарантии производителя.

Ремонт и сервис-центры

Если у вас есть вопросы по ремонту или обслуживанию, свяжитесь с вашим местным сервис центром или Converso Limited.

Контактная информация имеется на нашем сайте:
www.converso products.com
или электронной почте info@converso products.com

Просто подключите наушники, разъем для наушников вставьте в гнездо, расположенное на нижней панели ресивера. Могут быть использованы любые стандартные наушники со штекером 3,5-мм. Однако, чем лучше качество музыки тем лучше качество звучания вы услышите.

Подключите DAJ- кабель в гнездо приемника, а другой разъем в кохлеарный имплант или слуховой аппарат, в соответствии с инструкциями производителя. Эти кабели могут быть приобретены у производителя кохлеарного импланта или слуховых аппаратов.

Приемник также может быть подключен к настольным колонкам для дополнительного усиления. Для получения дальнейшей информации о том, как его использовать в этом случае, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером или Converso Limited.

С помощью микрофона - шейного шнура

